

Istruzioni d'uso “Scrivo Bene”

1. Requisiti di sistema

1.1 Requisiti di funzionamento

Al fine di permettere il corretto funzionamento di Scrivo Bene è necessaria l'installazione di un Web Browser di ultima generazione (es. Chrome, Mozilla, Safari, Edge).

1.2 Requisiti di sicurezza

1.2.1 Modello di business

B2B o B2C.

1.2.2 Controllo norme di sicurezza

Prima di cominciare l'esercitazione il professionista o il caregiver deve assicurarsi di:

- Impostare e far mantenere una corretta postura all'utente durante la partita
 - Regolare la luminosità dello schermo in base all'ambiente circostante
 - Non far utilizzare il dispositivo elettronico per più della durata consigliata.
-

2. Destinazione d'uso

Scrivo Bene è una web app destinata a persone con disortografia o con difficoltà ortografiche. Gli utilizzatori di Scrivo Bene non devono avere una formazione specializzata e/o qualifiche specifiche per poterla utilizzare in maniera corretta ed efficace.

1. Benefici clinici attesi

I soggetti con disortografia presentano deficit nei processi di cifratura del codice ortografico che si manifestano attraverso la presenza di errori nell'ortografia. Sulla base della letteratura esistente, sono state sviluppate attività che permettono di trattare le difficoltà relative alla conversione fonema-grafema e al recupero di una parola dal lessico ortografico.

4. Caratteristiche di prestazione

Scrivo Bene tratta la disortografia grazie a: riconoscimento vocale, esperienza di gaming autonoma, interattiva e dinamica

5. Verifiche prima dell'utilizzo

Nota bene: le informazioni riportate in questa sezione sono generiche e potrebbero cambiare in base al dispositivo elettronico utilizzato. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale utente del proprio dispositivo elettronico fornito dall'azienda produttrice.

5.1 Verifica per il corretto utilizzo

Prima dell'utilizzo di Scrivo Bene è consigliato verificare di esser dotati di una connessione Internet e di un Web Browser di ultima generazione (es. Chrome, Mozilla, Safari, Edge)

6. Specifiche di utilizzo

Nota bene: è sempre consigliato seguire le indicazioni di un professionista durante tutto il percorso riabilitativo.

6.1 Durata del trattamento e sessioni di esercizio

Ai fini riabilitativi, si consiglia di ripetere più volte gli esercizi fino a quando non venga raggiunta l'accuratezza totale delle risposte corrette al fine di consolidare maggiormente le competenze apprese e poter garantire un maggior successo dell'intervento. Per poter garantire i risultati attesi, un trattamento intensivo deve prevedere sessioni di 15-30 minuti l'una, possibilmente tutti i giorni, per una durata di almeno 3 mesi.

6.2 Descrizione generale

L'applicazione permette di effettuare un trattamento all'interno di uno scenario coinvolgente che alimenta gli aspetti motivazionali, ha come obiettivo quello di convertire i risultati riabilitativi desiderati in processi automatici grazie a un intervento effettuato in un contesto ludico e

coinvolgente che porta a migliori risultati, consente al paziente di effettuare non solo un trattamento domiciliare ma anche di aggiornare il terapeuta, ove presente, e di sperimentare una maggiore indipendenza e autonomia. Nella sezione dedicata ai risultati ottenuti è possibile vedere i progressi effettuati man mano che si completano le esercitazioni selezionando il filtro di riferimento. È presente una tabella contenente i dettagli dei giochi e una con il resoconto delle esercitazioni svolte in quel determinato gioco. Se il soggetto è seguito da un terapeuta, l'app Scrivo Bene invierà automaticamente una mail all'operatore sanitario (previo inserimento dell'indirizzo di posta elettronica) ogni settimana, precisamente ogni lunedì.



6.2.1 Esercitazione

1. Selezionare, dalla schermata iniziale, uno dei sei esercizi visualizzati.
2. In base all'esercizio selezionato, sarà possibile personalizzare lo stesso scegliendo i gruppi consonantici o le regole ortografiche sulle quali esercitarsi, il livello di difficoltà e la modalità di svolgimento, ove presente (*"Allena la memoria"* o *"Scrivi Veloce"*)
3. Una volta selezionate le impostazioni di gioco, verrà visualizzata una schermata in cui due macchine gareggiano per arrivare al traguardo. In seguito ad ogni risposta dell'utente verrà fornito un feedback visivo e uditivo in merito alla correttezza della risposta fornita.





One Health Vision s.r.l.

Scrivo Bene

Cellulare: +39 351 7547089
Email: info@onehealthvision.com
Sito: onehealthvision.com

Dispositivo Medico CE - Classe I
Regolamento (UE) 2017/745
ETI-FT7-SCRIVO-B Rev.0 del 06/10/23

7. Protocollo riabilitativo

L'app Scrivo Bene permette di potenziare le capacità di scrittura attraverso l'esecuzione di attività che prevedono il consolidamento delle abilità di base e successivamente di quelle avanzate attraverso il superamento dei singoli esercizi e l'avanzamento all'interno del gioco. Durante lo svolgimento degli esercizi vengono forniti costantemente feedback sulla correttezza delle risposte date. Ai fini riabilitativi, si consiglia di ripetere più volte gli esercizi fino a quando non venga raggiunta l'accuratezza totale delle risposte corrette al fine di consolidare maggiormente le competenze apprese e poter garantire un maggior successo dell'intervento. Per poter garantire i risultati attesi, un trattamento intensivo deve prevedere sessioni di 15-30 minuti l'una, possibilmente tutti i giorni, per una durata di almeno 3 mesi. L'obiettivo è stimolare l'overlearning cioè il superapprendimento del nuovo materiale che permette di disapprendere le modalità errate di rappresentazione mentale di una parola e sostituirla con una nuova sequenza corretta.

8. Segnalazioni

L'utilizzo del software non può portare a nessun tipo di incidente grave. A ogni modo, se in seguito all'utilizzo dell'applicazione si dovessero riscontrare gravi anomalie e/o malfunzionamenti, si prega di contattare immediatamente One Health Vision attraverso l'indirizzo email o il numero di telefono riportati nell'intestazione di questo documento.